

取扱説明書（取付方法）

■取付方法



① 90° 用のアタッチメントの場合、先ず (OUT) のロゴがある面を外側の上にして、写真のようにモダン（耳掛け部分）を内側になる穴に差し込みます。




② 1 で差し込んだモダンをアタッチメントを貫通するまで押し込んでください。



③ そのままアタッチメントをテンブル（つる）の奥までスライドさせます。
この時はだいたいの位置で構いません。



④ 次にホルダーをアタッチメントの外側の穴に、モダンと同じ要領で差し込みます。

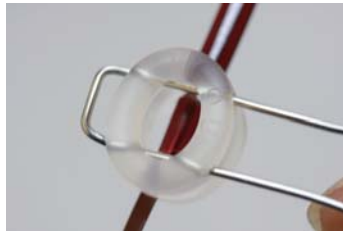

⑤ 次にホルダーも完全に貫通させるように押し込みます。



⑥ 写真のような形になれば装着が完了です。
同じ要領で反対側も装着を行います。



⑦ 左の写真の用に取付が出来れば完了です。
最後にホルダーとフレームを着用しホルダーとアタッチメントの位置を調整してください。



※着用の際は写真のように、ホルダーをかぶるように取り付けてください。

※70° 用のアタッチメントの場合



70° 用のアタッチメントを使用して前頭部で固定する場合、(OUT) のロゴを外側の上にします。

クロスホルダー用の先込み穴が (O) 側に傾斜がある方を左側に取付、(T) 側に傾斜がある方を右側に取付ます。

後頭部で固定する場合はアタッチメントの左右を逆に使用します。



※アレンジ例として上の写真のようにお好きな柄の布で筒状のカバーを作り、ホルダーに被せればカチューシャのような雰囲気でご使用頂けます。

■使用上の注意

※取付方法をよくお読みになり、正しく取り付けてご使用ください。

※肌に安全な素材を使用していますが、万が一異常があれば直ちに使用をやめ、お医者様にご相談ください。

※用途目的以外でのご使用は絶対にしないでください。

※アタッチメントは消耗品ですので、劣化や締め付け効果が弱くなりましたら、別売りのアタッチメントのみを購入してご使用ください。

有限会社金谷眼鏡

〒916-0018 福井県鯖江市幸町2丁目4-42

TEL:0778-51-1308 FAX:0778-52-6125 Email:happyglass@yahoo.co.jp